

Mascherina chirurgica "Toscana 2"

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa. Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani.

Per indossarle correttamente:

- ✓ Lavarsi le mani;
- ✓ Prendere 2 fogli allo scopo di ottenere la massima sicurezza;
- ✓ Piegare il lato corto del foglio a metà;
- ✓ Aprire i tagli per l'inserimento degli orecchi;
- ✓ Inserire nel primo orecchio;
- ✓ Inserire nel secondo orecchio facendo aderire a naso e bocca;
- ✓ Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.

Per toglierle:

- ✓ Lavarsi le mani
- ✓ Prendere con entrambe le mani l'angolo superiore della mascherina dietro l'orecchio;
- ✓ Tirare delicatamente gli angoli della mascherina all'indietro e verso l'alto in modo da far fuoriuscire le orecchie dalla mascherina;
- ✓ Portare lentamente in avanti le mani mantenendo la mascherina aperta;
- ✓ Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno;
- ✓ Lavarsi le mani

2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da altre persone.
3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro come da indicazioni dell'OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro.